



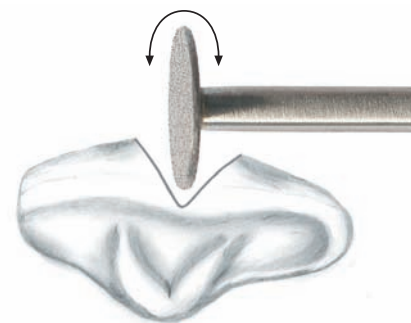

NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments
 Im Camisch 3 • D-07768 Kahla/Germany
 Tel. +49(0)36 424-573-0 • Fax +49(0)36 424-573-29
 e-mail: nti@nti.de • http://www.nti.de

ČZ česky

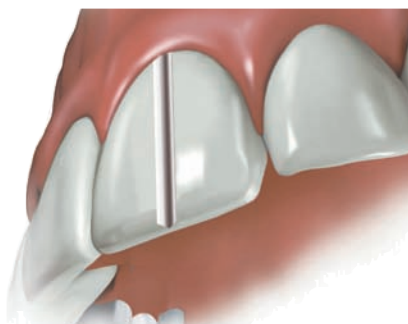

Informace o výrobku CrownCut

Řezačka na korunky se sintrovaným diamantem

Před použitím řezačky CrownCut si, prosím, důkladně přečtěte informace o výrobku. Výrobce neručí za škody, které vznikly nedodržením těchto předpisů resp. následkem nesprávné manipulace.

Obsah:

1. Oblasti použití řezačky na korunky
2. Doporučení pro použití
3. Dezinfekce, čištění, sterilizace

1. Oblasti použití řezačky CrownCut:

Řezačka na korunky CrownCut se může používat na řezání korunek z keramiky, kovů a oxidu zirkoničitého.

2. Doporučení pro použití:

1. Použití v ohebném kolenu s mikromotorem.
2. Ohebné koleno musí vydávat nejméně 50 ml chladicí vody za minutu. V případě pochybnosti je toto třeba to zkontrolovat před použitím. Učinite opatření na ochranu před stříkáním.
3. Pracovní otáčky:
 - 3.1. Počet pracovních otáček je v rozmezí 15.000 - 40.000 min⁻¹.
Kotouč se používá s mírným tlakem (0,5-2N).
 - 3.2. V oblasti gingivy pracujte s otáčkami 15.000 - 20.000 min⁻¹.
 - 3.3. V jiných oblastech korunky (incizálně a okluzálně) můžete otáčky zvýšit až na 40.000 min⁻¹, aby se s nástrojem dalo snadněji manipulovat.
4. **Důležité:** Je naprosto nutné, aby se řez provedl ve tvaru V do hloubky korunky. Řez je v horní části širší než v hloubce. Kotouč jinak může zůstat vězet mezi oběma částmi korunky, může se našikmo stočit a/nebo zlomit, když se pacient pohybuje. Řezačku na korunky, prosím, nepoužívejte k vybrušování korunky! (nebezpečí zlomu)
5. Řezačka na korunky se musí po každém použití ošetřit očistným kamenem. Bez čištění diamant ztrácí na výkonnosti při broušení. Dodržujte, prosím, návod k použití, který je přiložený k očistnému kameni.
6. Kotouč můžete používat na řezání korunek tak dlouho, dokud není příliš malý na to, aby ještě řezal.

3. Dezinfekce, čištění, sterilizace:

Před prvním použitím resp. po každém použití dezinfikujte CrownCut v dezinfekčním prostředku, schváleném pro diamantové nástroje (certifikovaný Německou společností pro hygienu a mikrobiologii-DGHM) podle předpisů příslušného výrobce.

Sterilizace se provede v autoklávu v podmínkách 134°C / 2,1bar / 5 min. resp. podle předpisů výrobce přístroje. Přitom je třeba dodržet normy DIN EN 13060 a DIN EN 285 (balení sterilního zboží v souladu s DIN EN 868) a zohlednit směrnice ústavu Robert-Koch-Institut část 7, E2 a E3.

Tento návod na použití najdete v následujících jazycích na naší webové stránce: www.nti.de

NL nizozemsky, GR řecky, H maďarsky, SK slovensky, FIN finsky, PL polsky, P portugalsky, SLO slovensky, DK dánsky, EST estonsky, LV lotyšsky, LT litovsky, S švédsky.